

Coverarm®

Beach chair

Sistema completo di trazionamento di spalla in artroscopia con paziente in posizione beach chair.

Per gentile concessione del Dr. Simone Nicoletti, Ospedale di Pistoia, Asl3.

Procedura: cuffia artroscopia

Istruzioni per l'uso:



Tavolo Operatorio con inserimento di un cosciale o altro ausilio per trazionamento dell'arto.



Estrarre il Coverarm® con tecnica sterile dal SBS (Sistema Barriera Sterile).



Collocare il paziente sul tavolo operatorio nella posizione beach chair. Iniziare la preparazione del campo con un accurata disinfezione dell'arto.



Aprire il Coverarm liberandolo dai nastri stretch-wrap. Collocare l'arto da operare all'interno del Coverarm® facendo attenzione che la mano sia in contatto con la parte distale del Coverarm.



Avvicinare i lembi del Coverarm. Con i nastri stretch-wrap iniziare a chiudere il Coverarm® sul braccio del paziente regolandone la pressione e tensione.



Agganciare sempre con tecnica sterile il gancio della corda di trazione nella fibbia a D posta nella parte distale del Coverarm®.



Far scorrere la corda nell'incavo del cosciale e agganciarla con tecnica non sterile ai relativi pesi di trazionamento.



Ultimato il campo, l'arto superiore è pronto e trazionato nella misura giusta scelta dal chirurgo per la successiva artroscopia senza che ci siano altri operatori a dover sostenere il braccio in sospensione.

Note: in caso di dover, per ragioni chirurgiche, muovere l'arto, si consiglia di disarticolare, con tecnica sterile, il filo di trazione dalla fibbia a D posta distalmente al Coverarm®

AGENTE AUTORIZZATO

COVERARM®:
CND Y090612
RDM 325595
CE 0373
STERILE



Tiaset
Sp Loc Botriolo Km 5,100
52020 Castelfranco di Sopra
Arezzo (Italia)

P.IVA n° 01999370511
CF CRRLNZ84B20F656W
REA 154836 AIA 54010
www.tiaset.com

Tel. +39 055 9149122
Fax +39 055 9149122
Mobile +39 3284634811
E-mail: info@tiaset.com

